


AFFIXUS Natural Nail ® Sistema humeral



Folleto de producto

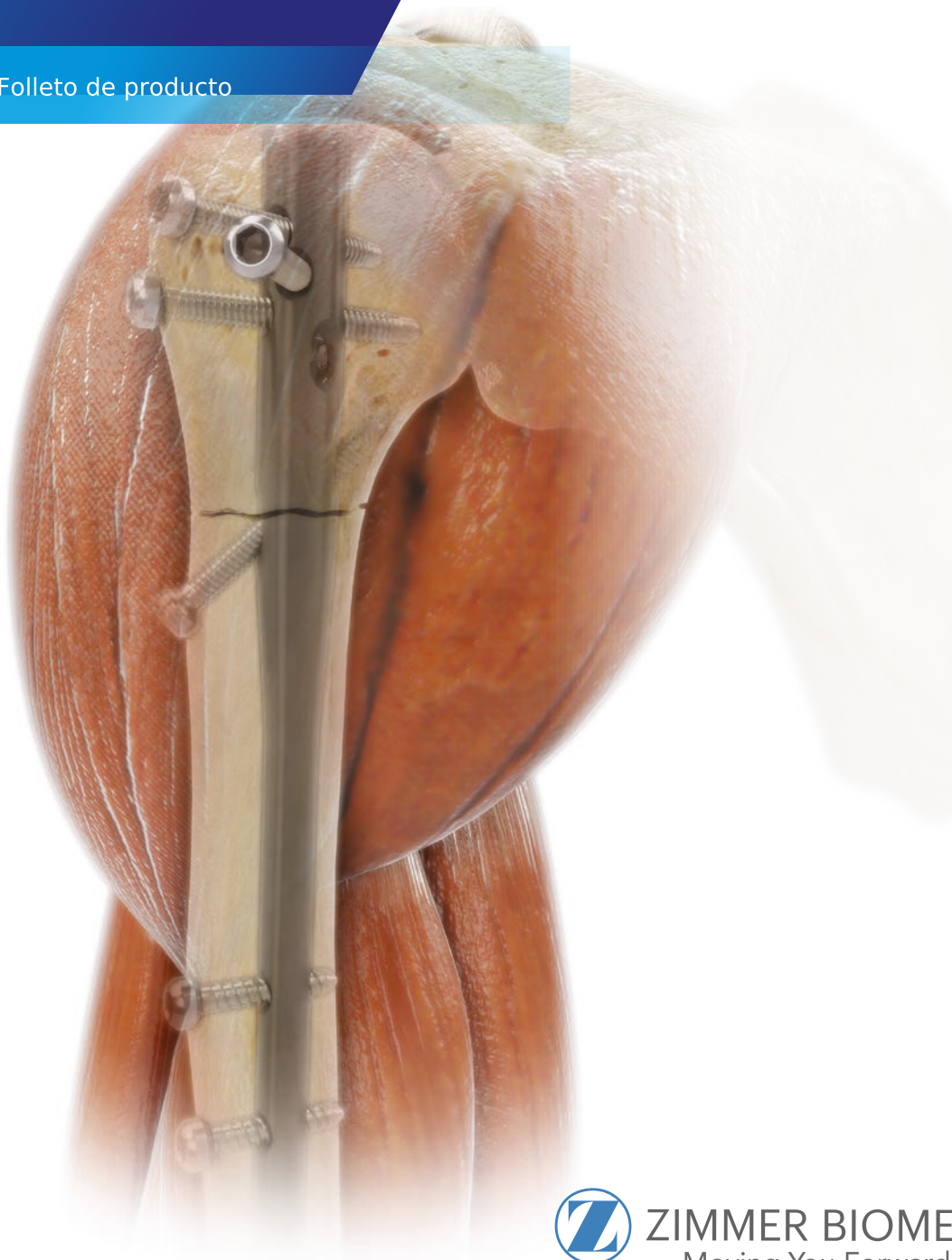

ZIMMER BIOMET
Moving You Forward

Implantes diseñados para tratar una variedad de fracturas humerales.

El Sistema Humeral AFFIXUS Natural Nail es un sistema de enclavado para huesos largos basado en las plataformas intramedulares Natural Nail y AFFIXUS. Este sistema ofrece un portafolio completo de implantes e instrumentos, que trata una amplia gama de fracturas humerales utilizando una instrumentación simple y eficiente.

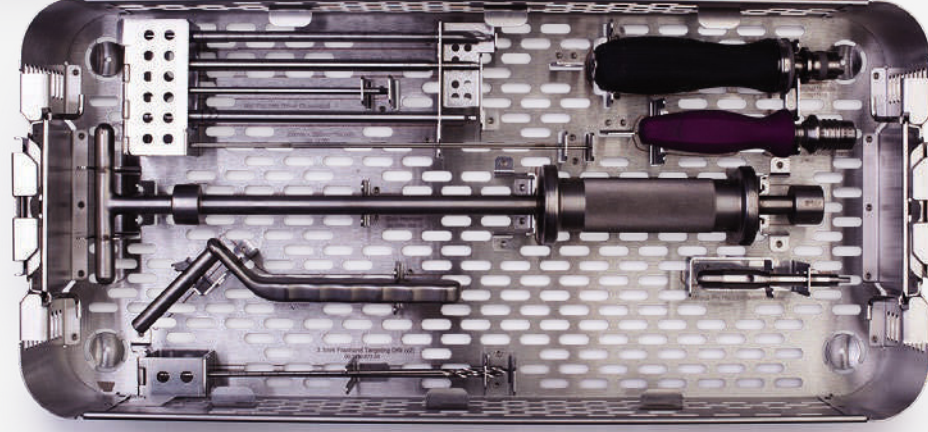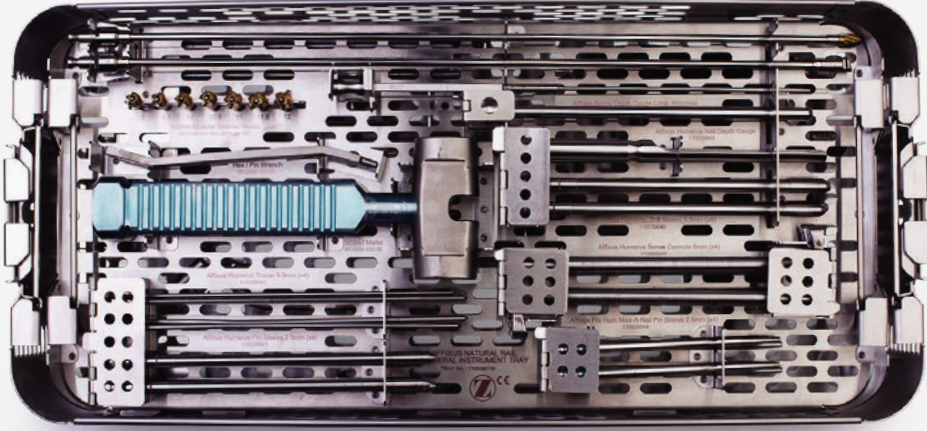


EFICIENTE

Las cajas de instrumentos están diseñadas en un formato simple, por pasos y codificado por colores para facilitar su uso y permitir procedimientos reproducibles para el cirujano y el personal del quirófano. Las cajas de instrumentación también están diseñadas de forma modular para proporcionar eficiencias de espacio e inventario al hospital. Las cajas incluyen opciones intraoperatorias como portales de entrada, herramientas de reducción y colocación de tornillos codificados por colores.

Implantes diseñados para tratar una variedad de fracturas humerales.

El Sistema Humeral AFFIXUS Natural Nail es un sistema de enclavado para huesos largos basado en las plataformas intramedulares Natural Nail y AFFIXUS. Este sistema ofrece un portafolio completo de implantes e instrumentos, que trata una amplia gama de fracturas humerales utilizando instrumentación simple y eficiente.

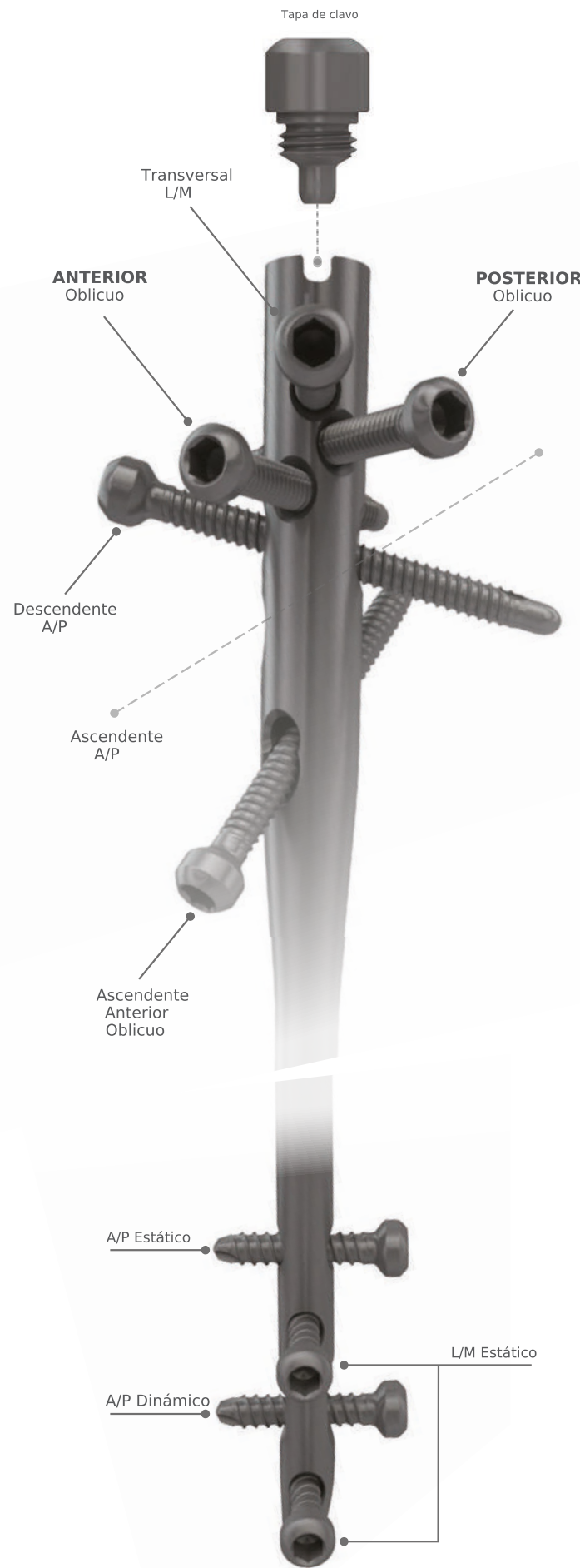

EXTENSO

Creado con opciones de fijación aguda para muchos patrones de fractura desafiantes, el Sistema AFFIXUS Natural Nail fue diseñado con dos opciones de implante para fracturas humerales en enfoques quirúrgicos tanto anterógrados como retrógrados.

Los implantes de clavo, específicamente, fueron diseñados con múltiples opciones de tornillos posicionados en ejes multiplanares, incluyendo AP, ML oblicuo y ángulos ascendentes/descendentes, lo que permite a los cirujanos utilizar un enfoque mínimamente invasivo incluso en las fracturas humerales más complejas. El sistema también incluye tornillos de punta roma y arandelas opcionales para aplicaciones más precisas, si se desea.



Arandelas



Tapas de clavo



ANTERÓGRADO / RETRÓGRADO



HUMERAL PROXIMAL

AVANZADO


El implante humeral proximal AFFIXUS Natural Nail presenta la tecnología patentada CoreLock™, integrando un mecanismo de bloqueo de ángulo fijo en el clavo, permitiendo al usuario bloquear todos los tornillos metafisarios en la estructura a un ángulo fijo de una sola vez.

Los implantes de clavo también están diseñados con múltiples opciones de trayectorias de tornillos ascendentes y descendentes para seleccionar una fijación específica, si se desea.

Las guías de direccionamiento ofrecen asistencia para la reducción y posicionamiento de tornillos, con cánulas de pin específicas y ubicaciones para la orientación de fragmentos y estabilidad rotacional.



Mecanismo CoreLock

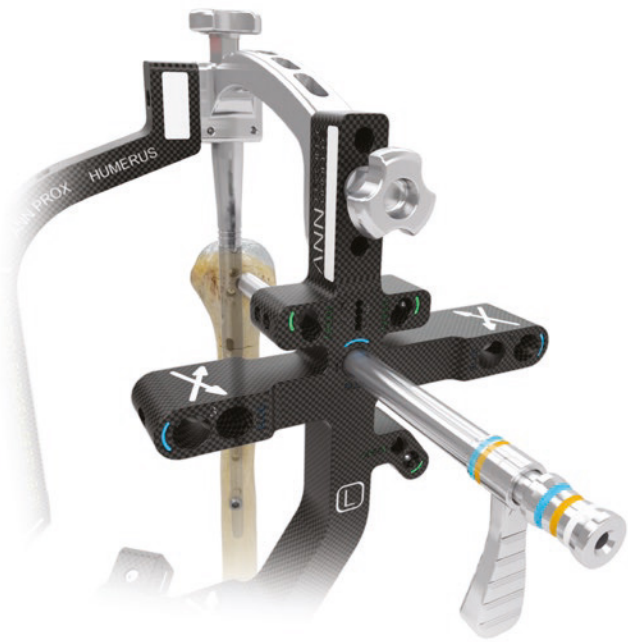


Guía de direccionamiento para húmero proximal



Guía de direccionamiento anterógrado/retrógrado

Implante Dimensiones

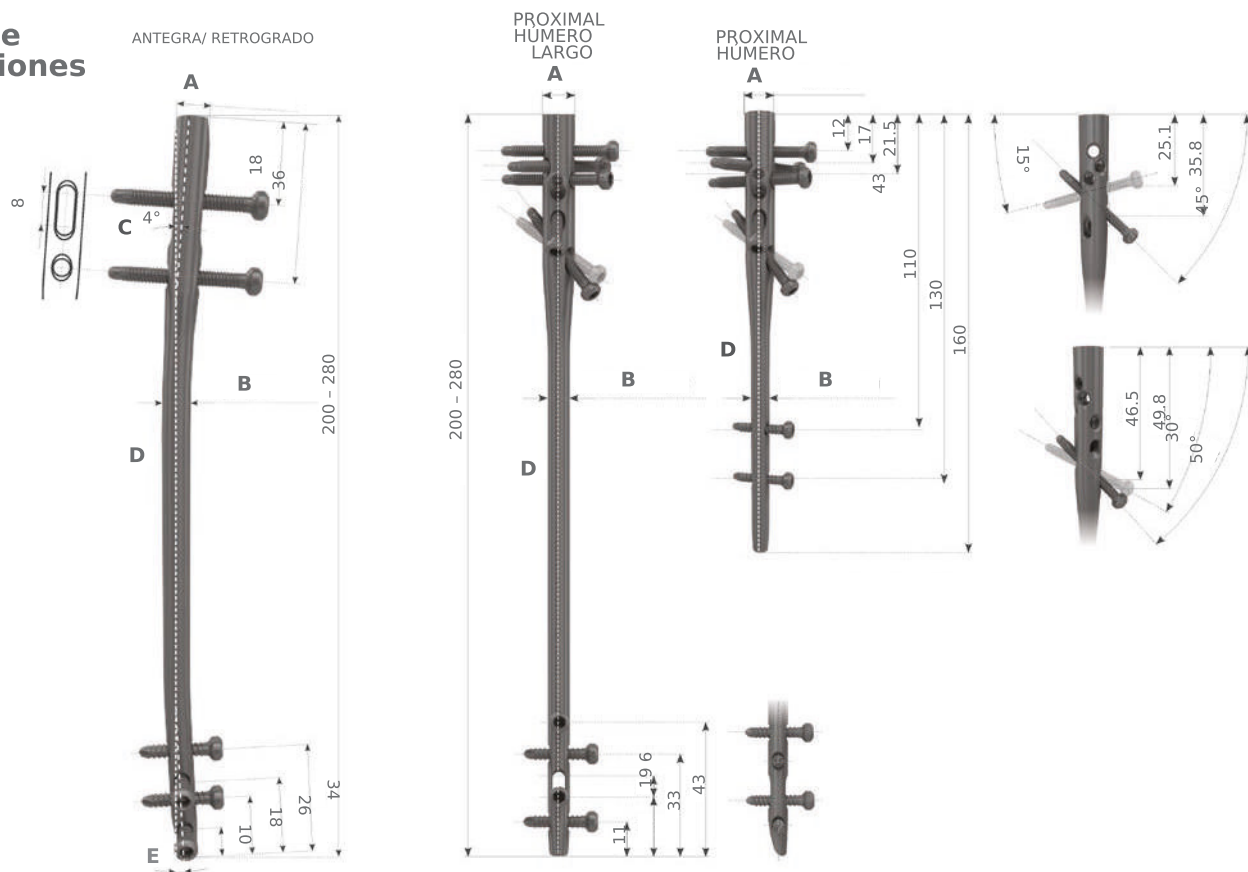

Todo el contenido aquí está protegido por derechos de autor, marcas registradas y otros derechos de propiedad intelectual, según corresponda, propiedad de o bajo licencia de Zimmer Biomet o sus afiliados, a menos que se indique lo contrario, y no debe ser redistribuido, duplicado ni divulgado, total o parcialmente, sin el consentimiento expreso por escrito de Zimmer Biomet. Este material está destinado a profesionales de la salud. Se prohíbe la distribución a cualquier otro destinatario.

Para indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones, posibles efectos adversos e información para el asesoramiento al paciente, consulte el prospecto o contacte a su representante local; visite www.zimmerbiomet.com para información adicional del producto.

Verifique las aprobaciones del producto en su país y consulte las instrucciones específicas de uso del producto.

©2019 Zimmer Biomet

	ANTEGRA/RETROGRADO	HÚMERO PROXIMAL LARGO	HÚMERO PROXIMAL
Dim.	Diámetros proximalesz		
A	8.5 / 9.5 mm	10.5 mm	10.5 / 11.0 mm
	Diámetros/Longitudesz		
B	7.5 / 9.5 mm de 200-280 mm de longitud (en incrementos de 20 mm)	7.0 / 8.5 / 10.0 mm de 200-280 mm de longitud (en incrementos de 20 mm)	7.0 / 9.0 / 11.0 mm a 160 mm de longitud
	Curvatura metafisariáz		
C	4°	0°	0°
	Curvatura diafisariáz		
E	3° si se utiliza el clavo A/R en posición anterógrada.	0°	0°
	Diámetros de canalizacióz		
D	4.2 mm DI a 7.0 mm DE 4.8 mm DI a 9.5 mm DE	4.2 mm DI a 7.0 mm DE 4.8 mm DI a 8.5 / 10 mm DE	4.2 mm DI a 7.0 mm DE 4.8 mm DI a 9.0 / 11.0 mm DE
	Tornillos distalesz		
	2 tornillos transversales 2 tornillos A/P	1 A/P estático 1 A/P dinámico 2 L/M estáticos	2 L/M estáticos
	Tornillos proximalesz		
	Tornillo transversal 1 tornillo de compresión	1 transversal L/M 1 oblicuo anterior 1 A/P descendente o 1 A/P ascendente 1 oblicuo posterior 1 oblicuo anterior ascendente 30° o 50°	1 transversal L/M 1 oblicuo anterior 1 A/P descendente o 1 A/P ascendente 1 oblicuo posterior 1 oblicuo anterior ascendente 30° o 50°